

Defi[®] 5S +



DESFIBRILADOR AED-100



PASO 1

Inicio del dispositivo

Encienda el equipo
La instrucción de voz comienza inmediatamente para guiarle sobre cómo operar el DEA.

PASO 2

Fije las almohadillas al paciente

Después de colocar las almohadillas, el DEA comenzará inmediatamente a analizar el ECG.
El dispositivo pasará al siguiente paso solo después de que coloque bien las almohadillas.

PASO 3

Selección de energía

La guía internacional de reanimación* recomienda reducir la energía del paciente infantil para evitar quemar el músculo cardíaco.
La serie AED-100 puede reducir la energía a 30/70J simplemente seleccionando el rango de energía

PASO 4

presiona el botón


Si se necesita la descarga, el botón de descarga parpadea.
Presione el botón para administrar la descarga eléctrica al paciente.



Ventajas


- 2 Idiomas para elegir.
- 5 niveles de volumen de sonido.
- Botón de modo adulto/niño.
- Infrarrojos para transmisión de datos
- Autocomprobación diaria, semanal y mensual.
- Uso del DEA mientras está en la bolsa.

1. Indicadores Leds

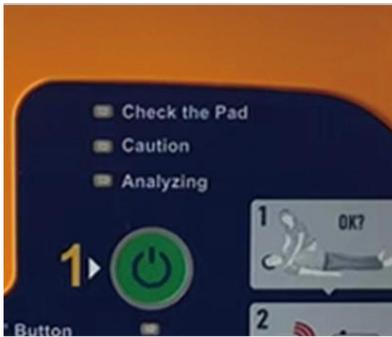

Indicadores LED de color para cada paso

2. Selección de energía

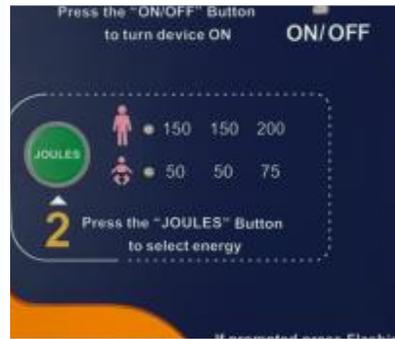

Secuencia de energía seleccionable de 50 J a 200 J para diferentes edades y diferente situación

3. Altavoz



El diseño del altavoz de alta calidad proporciona un gran sonido y un volumen alto que hace fácil escuchar las instrucciones del dispositivo en lugares públicos

4. Guía



Pasos visuales para usar un desfibrilador externo automático

5. Instrucciones



Instrucciones escritas en el dispositivo para cada paso y cada botón

Autotest	Diario semanal mensual
Modo	Adulto, niño
Forma de onda	Exponencial truncada bifásica
Energía	200 joules maximo
Secuencia de energía	Modo infantil: 5 0 / 5 0 / 7 5 joules Modo adulto: 150/150 / 200 joules
Tiempo de carga (Nuevo, a 25 °C)	Menos de 6 seg. a 150J Menos de 8 seg. a 200J
Aviso de voz	Mensaje de voz extenso
Indicadores Visuales	Indicadores LED
controles	Dos botones: ENCENDIDO/APAGADO, Descarga
Almacenamiento de ECG	1500 eventos
Transmisión de datos	Infrarrojo
Encendido	Batería no recargable
Tipo	12V,2800mAh ,celdade Li-MnO2 de 12 V
Dimensiones	Profundidad (P): 80 mm Ancho (ancho): 2400 mm longitud (largo): 300 mm
Peso (con batería)	1,9 kg (4,2 libras)
Temperatura de funcionamiento	o.c a 40°C
Humedad de funcionamiento	Humedad relativa entre 30% y 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	- 20 °c a 55 °C
Humedad de almacenamiento(sin batería)	Hasta 93% (sin condensación) Física

Estuche



señal reflectante



Fácil Agarre

Protección de altavoz

Panel transparente

protector de enchufe

Batería

CR123A - 4x2 2.8Ah 12 Voltios Batería no recargable



Parches desechables

Diseñado para el uso de desfibrilación externa, marcapasos no invasivo, cardioversión sincronizada y monitorización en adultos y niños que pesan más de 20 kg (55 lbs).



A silver laptop is shown from a front-facing perspective, open. The screen displays contact information for PROMED COLOMBIA S.A.S. The text is centered on the screen. To the left of the text, there is a faint, light grey rectangular shape with a small blue dot at its top-left corner.

PROMED COLOMBIA S.A.S

Calle 42 # 19 – 91

TEL: 6960943 – 3145299683 – 3138322395

comercial@equiposmedicos.com.co

www.equiposmedicos.com.co